

## Clinitek Status+ huolto-ohje

### Päivittäinen puhdistaminen



1. Vedä lukualusta hitaasti ulos.
2. Irrota testipöytä (adapteri). HUOM: Älä koske valkoiseen kalibrointikenttään.




3. Kostuta pumpulipuikko vedellä ja pyyhi testipöytä ja lukualusta huolellisesti, jos niissä on selkeitä likakohtia.
4. Huuhtelee muutoin lukualustan ja testipöydän molemmat puolet juoksevan veden alla (ei kalibrointikenttää).



5. Kuivaa huolellisesti nukkaamattomalla liinalla. HUOM: Älä koske valkoiseen kalibrointikenttään!
6. Tarkista että valkoinen kalibrointikenttä on puhdas ja naarmuton. Tarvittaessa puhdistu se puhtaalla vedellä kostutetulla pumpulipuikolla.
7. Anna kalibrointikentän kuivua itseksensä ja tarkista sen kunto uudelleen.
8. Aseta lukualusta takaisin paikalleen ja työnnä se puoliksi sisään.

### Paperirullan vaihto

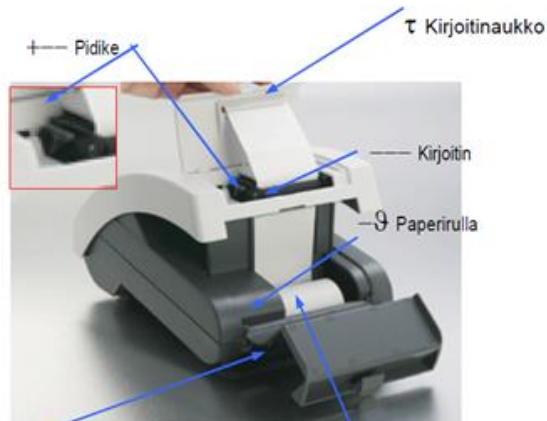

Paperirullalokeron kansi Paperirullalokero

1. Avaa kirjoittimen t ja paperirullalokeron D kansi.
2. Vapauta paperipidike +-.
3. Aseta uusi paperirulla paikalleen I.
4. Vie paperi kirjoittimen aukon läpi.
5. Lukitse paperipidike +-.
6. Vie paperi kirjoittinaukon t läpi.
7. Sulje kirjoitinkansi t ja paperirullalokeron D kansi.

Merkitse tekemäsi huollot huoltolomakkeeseen