

Clinitek Status+ pikakäyttöohje


Lyhyt käyttöopas




Testikasetti

Liuska

1. Tarkista että adapteri (testipöytä) on oikein päin (kasetti tai liuska)
2. Ota esiin haluttu testikasetti tai liuska

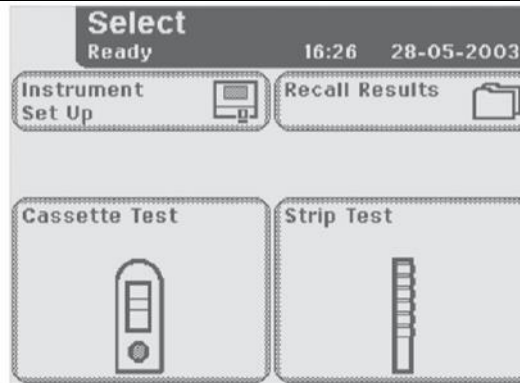

3. Valitse testi painamalla haluttua kuvaa.
Testiliuskatestissä Strip test
4. Syötä potilaan ID, jos käytössä.

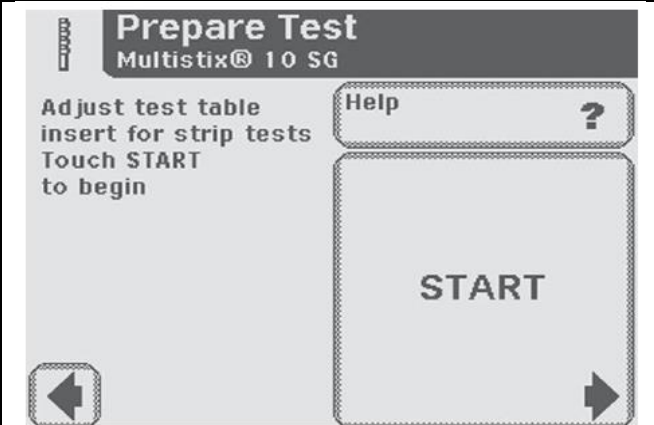


5. Paina *Start*. Sinulla on 8 sekuntia aikaa seuraaviin toimenpiteisiin:



6. Kasta liuska virtsanäytteeseen, vedä liuskaa näyteastian reunaa pitkin, jotta ylimääräinen virtsa valuu pois. Kuivaa vielä liuskan reuna paperia vasten, jotta reagenssityynyjen väliset nestesillat poistuvat.



7. Aseta liuska testipöydälle
Aseta reagenssiliuska alustan pidikeuraan niin, että testikohdat ovat ylöspäin. Työnnä liuskapidikeuran päähän saakka.

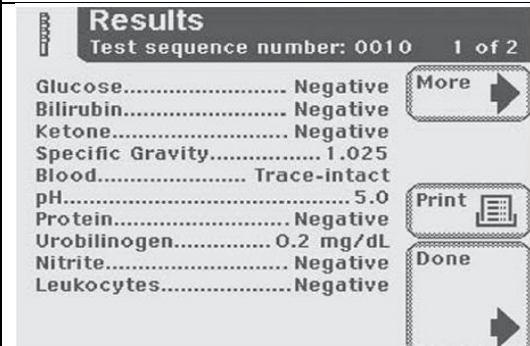

8. Tulos näkyy ruudulla kun määrittäminen on valmis. Paina *Done* (valmis), kun haluat palata aloitusvalikkoon

Puhdista testipöytä joka näytteen jälkeen, vastaa tulos atk-järjestelmään