

## NÄYTTEET AIVOKUOLLEELTA ELINLUOVUTTAJALTA, NÄYTTEENOTTO-OHJE

### Tutkimuksen tilaus

Tehostetun hoidon osasto tekee tutkimuspyynnön atk:lle. Tutkimuksen **tilausnumero on 8308** (B -ElinLuo). Tilausnumerolla tulostuvat kaikki SPR:lle lähetettävien verinäytteiden atk-tarrat.

### Näyte

Kun aivokuolema on todettu ja elimet luovutetaan, otetaan seuraavat näyteputket SPR:n ohjeistuksen mukaan. (Malliputket kärryvälikön ylähyllyllä)

#### Näytteet aikuisilta:

- 70 ml sitraattiverta, 8 x 9 ml
- 20 ml kokoverta 2 x 10 ml (tai 4 x 5 ml) seerumiputkia
- 30 ml EDTA-verta, 3 x 9 ml EDTA-putkia

#### Näytteet lapsilta:

- 4 x 7 ml sitraattiverta (Lapsi alle 15 kg 3x7 ml)
- 1 x 10 ml seerumia
- 1 x 9 ml EDTA-putkia

### Näytteen käsittely

Aikuisten ja lasten näytteet käsitellään samalla tavalla:

- Sitraattiveret 8 x 9 ml (lasten näytteet 4 x 7 ml) lähetetään KOKOVERENÄ, ei fuugausta
- Seerumiputket 2 x 10 ml (lasten näytteet 1 x 10 ml) lähetetään KOKOVERENÄ, ei fuugausta
- EDTA-putket 3 x 9 ml (lasten näytteet 1 x 9 ml) SENTRIFUGOI 2500 G 10 min, EROTTELE, LÄHETÄ PLASMANA

### Tutkimuksen lähete

SPR:n kudostyyppityöosaston lähete (Kudossopeutuvuustutkimukset HLA/Elinsiirto), jonka pyytävä osasto täyttää. Läheteeseen tulee teksti ELINSIIRTO.

### Näytteiden lähetys ja laskutus

Näytteet toimitetaan **välittömästi** SPR:n Veripalvelun kudossopeutuvuustutkimusosastolle.

Verinäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä. **Näytteet säilyvät huoneenlämmössä 24 h.** Näyteputket pakataan styrox-koteloihin, koska näytteet eivät saa jäätyä. Kotelot sekä täytetty lähete pakataan huolellisesti lähetuspussiin. Läheteitä ja osoitetarroja löytyy mm. kärryväliköstä fläppitaulusta tai sihteerien kansliasta. Lähetettävät erikoistutkimukset -kansista.

**Toimitusosoite:**

SPR VERIPALVELU  
Näytteiden vastaanotto  
Kudossopeutuvuustutkimukset  
Härkälenkki 13 C  
01730 VANTAA

Verinäytteet toimitetaan taksilla. Kuljetus tilataan **puh. 4333**.

Täytä ”Taksilla kuljetettu veri- tai näytekuljetus Tampere tai Helsinki”-lomake, joka löytyy verikeskuksesta Taksikortit-kansiosta. Merkitse lomakkeeseen Vastaanottaja maksaa kuljetuksen.

*Ilmoitus SPR:lle*

Verinäytteiden lähetyksestä ilmoitetaan **klo 8–22 SPR:n Veripalvelun Kudossopeutuvuustutkimukset puh. 029 300 1212**

Yöaikaan (22–08) lähetyksestä ei tarvitse ilmoittaa. Jos kysyttävää, voi ottaa yhteyttä edellä olevaan puhelinnumeroon.

**Teho ilmoittaa aina näytteenotosta suoraan elinsiirtokoordinaattorille** 0400 45 9060 (24/7), jolta menee tieto kudossopeutuvuustutkimusosastolle. Laboratorion EI tarvitse olla erikseen yhteydessä elinsiirtokoordinaattoriin.

**Vastaaminen**

Näytteet vastataan atk:lle OTETTU-merkinnällä x 3 (B -ElinLuo, B -Elinlu1, B -ElinLu3).

**Vastuuhenkilöt**

Osastonhoitaja

**Korvaa ohjeen**

Näytteet aivokuolleelta elinten luovuttajalta SPR:n näytteenotto-ohje versio 3.3

**Muutokset**

Versio 3.1 Näytemäärät ja näytemuodot muuttunut, puh. numerot päivitetty ja taksi kuljetus kohta päivitetty.

Versio 3.2: Päivitetty näytteiden pakkaus käytäntöjä sekä poistettu EDTA -näytemuoto sitraattiveren rinnalta.

Versio 3.3: Päivitetty näytteiden pakkauskäytännöt sekä SPR:n yhteystiedot

Versio 3.4: Lisätty ohjeeseen näytteenotto lapsilta sekä näytteiden säilyvyysaika. Päivitetty Ilmoitus SPR:lle -osio.