




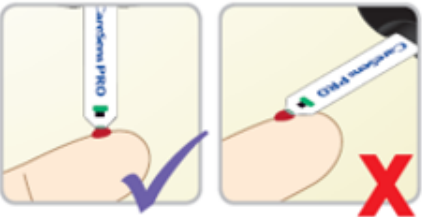






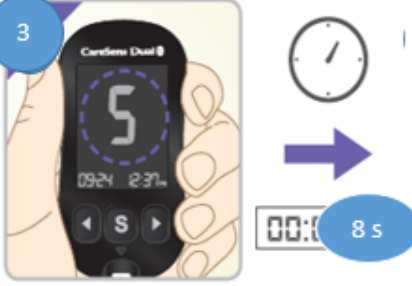




CareSens™ Dual

Pikakäyttöohje / Snabbanvisning / Quick Reference Guide

									
<p>Puhdista näytteenottoaika. Anna pistopaikan kuivua. Tee pistos lansetilla. Ota näyte toisesta pisarasta.</p>			<p>Vaihtoehtoisesti voit käyttää EDTA tai hepariinikokoverta. Sekoita putki, laita pieni tippa parafilmin päälle, ota näyte siitä kuten sormenpästä.</p> <table border="1"> <tr> <td>Hepariini-putki</td> <td>HEP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDTA-putki</td> <td>EDTA</td> <td></td> </tr> </table>	Hepariini-putki	HEP		EDTA-putki	EDTA	
Hepariini-putki	HEP								
EDTA-putki	EDTA								
			<p>Vastaa tulokset käsin lifecare-järjestelmään.</p>						